

Provtagningsinstruktion Ekvint arteritvirus (EAV) sperma

- PCR-analys ska utföras på råsjperma. Pre-ejakulat är inte ett accepterat provmaterial.
- Samla minst 0,4 ml råsjperma i ett tätslutande provrör.
- Provet skickas tillsammans med kylklamp och ska anlända till labbet inom 48 timmar.
- Ett prov som inte kan skickas omgående ska förvaras fryst inför transport.

- Var noggrann med att förpacka proverna korrekt (se [Packa ditt prov](#) på www.sva.se)