

VIP Provtagningsinstruktion - IB-virus

IB-virus

Provtagningsinstruktion för test av förekomst av IB-virus hos kycklingar

Utrustning

- Sax eller skalpell.
- Märkpenna
- Plastpåse
- Vadderat kuvert
- Remissblankett

Proven tas på slaktade eller avlivade djur

IB-virus finns under akutstadiet en kort tid i luftrören men stannar kvar en längre tid efter infektionen i caecaltonsillerna som provtas för PCR-undersökning.

Provtagningsteknik

Caecaltonsillerna är belägna i de smala delarna av blindtarmen i närheten av blindtarmsförgrening där de mynnar i colon. Saxen pekar på den på bilden.

Tarmpaketet tas ut och blindtarmarna friprepareras. Provet med blindtarmsförgreningen tas ut med sax eller skalpell. Snitten är markerade på bilden. Fem prov från den undersökta flokken tas ut och läggs tillsammans i en plastpåse.

Transport av prover

Proverna kan skickas till laboratoriet per post.

Glöm inte att märka proven och fylla i remissen!



*Provtagning av blindtarm.
Foto: Faruk Otman/SVA*