



Instruktion för att provta jagade vildsvin i övervakningsområdet utanför ASF-smittad zon

OBSERVERA: Provtagningen avser vildsvin fällda inom de kommuner eller delar därav som omger det område som är 'smittad zon', men inte ingår i denna. Det omfattar de delar av kommunerna Avesta, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Surahammar och Västerås som inte redan omfattas av den smittade zonen.

DETTA BEHÖVER DU:

- Märkpenna och kulspetspenna
- Kniv
- SVA:s provtagningskit* för ASF-provtagning av **jagade vildsvin** utanför smittad zon. I paketet finns:
 - Engångshandskar
 - Remiss
 - Våtservetter eller handsprit och pappersservetter
 - Rör för organprov
 - Transportpåse
 - SVA-kuvert

ETT KIT = ETT DJUR

Dessa kit avser djur fällda vid normal jakt i övervakningsområde. Proverna samlas in i den utökade, frivilliga övervakningen avseende afrikansk svinpest i angivet område. Dessa vildsvin hanteras precis som vanligt vid jakt avseende urtagning, trikintestning och konsumtion. Provtagningen görs i övervakningssyfte.

UTTAG AV MJÄLTE

- 1) Vid urtagning, hitta mjälten som ligger på vänster sida av buken, längs magsäcken.
- 2) Skär loss en sockerbitsstor bit av mjälten och lägg i det medföljande röret för organprov.
- 3) Om mjälte saknas till exempel från skottskada kan annat blodförande organ såsom lunga, lever eller njure användas.

OBS! Om du provtar fler vildsvin - byt handskar och rengör kniven noga med medföljande handsprit eller våtservett mellan varje provtagning.

REMISS

Ett djur per remiss, insänds med ett prov i ett kuvert. Vi ber er ange skottdatum, om djuret upplevdes som friskt eller uppvisade tecken på sjukdom. Ange i så fall gärna vad i kommentaren. Provmaterialet är mjälte i första hand, om annat används anges även detta på remissen. I övrigt önskar vi uppgift om uppskattad vikt, ålderskategori och kön.

Koordinater och system för platsen där djuret fällts måste anges på remissen!

* Du kan beställa fler kit genom att ringa 018-67 40 00 och fråga efter viltsektionen eller via mail: vilt@sva.se

SÅ HÄR PACKAR DU PROVERNA

- Märk röret med datum och ev. egen djurbenämning. Torka vid behov av röret på utsidan med en våtservett (se till att märkningen inte suddas ut!), kontrollera att locket är åtskruvat och placera sedan röret i den bifogade transportpåsen som försluts.
- Fyll i remissen och lägg den tillsammans med transportpåsen i kuvertet.
- Om provuttag sker på en helg, förvara gärna provet i kyl tills det kan postas på en måndag till torsdag för att undvika att proverna blir liggande över helgen.

Lycka till och tack för att du bidrar till övervakningen!